

MANUAL DE USUARIO
**Jazzy Carbon
Ultra Lite**



pridemobility.es



DIRECTRICES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA Un proveedor autorizado de Pride o un técnico cualificado debe realizar la configuración inicial de esta silla eléctrica y debe llevar a cabo todos los procedimientos de este manual.

Los símbolos que aparecen a continuación se utilizan a lo largo de este manual del usuario y en la silla eléctrica para identificar advertencias e información importante. Es muy importante que los lea y los comprenda completamente.



ADVERTENCIA Indica una condición/situación potencialmente peligrosa. Si no se siguen los procedimientos indicados, pueden producirse lesiones personales, daños en los componentes o un funcionamiento incorrecto. En el producto, este icono se representa como un símbolo negro sobre un triángulo amarillo con un borde negro.



OBLIGATORIO Estas acciones deben realizarse según se especifican. No realizar las acciones obligatorias puede causar lesiones personales y/o daños al equipo. En el producto, este icono se representa como un símbolo blanco sobre un punto azul con un borde blanco.



¡PROHIBIDO! Estas acciones están prohibidas. Estas acciones no deben realizarse en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Realizar una acción prohibida puede causar lesiones personales y/o daños al equipo. En el producto, este icono se representa como un símbolo negro con un círculo rojo y una barra oblicua roja.

USO PREVISTO

Esta silla eléctrica incorpora diseños propios del fabricante y puede ser utilizada en espacios reducidos tanto interiores como exteriores por el ocupante y está pensada para transportar cómodamente a personas adultas únicamente, excluyendo mercancías, pero el peso del usuario debe limitarse a 125 kg (275 lbs). Tampoco debe ser utilizada por personas que padezcan manifiestamente limitaciones físicas o mentales que las incapaciten para manejar con seguridad la silla eléctrica en el tráfico.

CONTENIDO

1. CARTA A LOS USUARIOS	2
2. ATENCIÓN.....	3
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
4. INSTALACIÓN Y AJUSTE	10
5. INSTRUCCIONES DE USO	17
6. BATERÍA Y CARGADOR.....	26
7. CONTROLES DIARIOS Y MANTENIMIENTO	27
8. GARANTÍA	Error! Bookmark not defined.
9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS	32
10. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	33

1. CARTA A LOS USUARIOS

Este producto ha sido diseñado y fabricado por Kunshan Hi-Fortune Health Products Co., Ltd en nombre de Pride Mobility Products Europe BV.

Este Manual del Propietario forma parte de las especificaciones del producto; por favor, asegúrese de que acompaña a cada producto vendido y de que se lee detenidamente y se comprende antes de utilizar o conducir la silla eléctrica. Este Manual del usuario se ha elaborado a partir de las últimas especificaciones e información sobre el producto disponibles en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho a realizar cambios cuando sea necesario.

Cualquier cambio en nuestros productos puede causar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones del Manual del Propietario y el producto que usted ha adquirido.

NOTA: Este producto cumple las directivas y requisitos WEEE, RoHS y REACH. NOTA: Este producto cumple la clasificación IPX4 (IEC 60529).

NOTA: Este producto y sus componentes no están fabricados con látex de caucho natural. Consulte con el proveedor autorizado de Pride acerca de cualquier accesorio posventa.

Le rogamos que conserve la siguiente información: .

Información sobre la producción (pegue el código de barras)

2. ATENCIÓN

2.1. INSPECCIÓN DE DESEMBALAJE

Utilice la lista de piezas suministrada para comprobar si alguna pieza o componente está dañado o falta. Si hay algún daño o falta alguna pieza, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor o concesionario.

- Silla eléctrica 1
- Cojín 1 juego
- Cargador 1
- Manual del usuario

2.2. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolos	Descripción	Nota
 ADVERTENCIA	Identificación del peligro de causar la muerte o lesiones personales.	
 PRECAUCIÓN	El incumplimiento de los procedimientos indicados puede causar lesiones personales, daños a los componentes o fallos de funcionamiento.	
	Obligatorio	
	Prohibido	
	Consulte el manual/folleto de instrucciones	
	Advertencia: existen pellizcos en las manos/dedos	
	Tipo B IEC 60601-1	
	Clase II IEC 60601-1	
	Bloqueado y en modo de conducción. Coloque la unidad en un terreno llano y colóquese a un lado cuando cambie de modo de accionamiento a rueda libre. o el modo de rueda libre al modo de conducción. Desbloqueo y en modo rueda libre.	
	Etiqueta informativa de la silla eléctrica	
	Fabricado en	
	No retire las ruedas antivuelco.	

2. ATENCIÓN

2.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ Lea atentamente este Manual del Propietario antes de utilizar su silla eléctrica y asegúrese de que comprende el uso y los detalles de funcionamiento de todos los componentes. que están presentes.

ADVERTENCIA:

- ⊘ No circule por carreteras con mucho tráfico o con barro, grava o baches, estrechos, cubiertos de nieve o hielo, caminos rurales no protegidos por vallas o setos. Los altos niveles de humedad o las condiciones muy frías pueden reducir el rendimiento de tu silla eléctrica.
- ⊘ Nunca intente modificar físicamente una silla eléctrica, incluyendo la adición de componentes de terceros, ya que los cambios en las sillas eléctricas anularán su garantía y es probable que afecten a la conformidad y a la evaluación de riesgos.
- ⚠ No desplace bruscamente la gravedad de su cuerpo, ya que la silla podría volverse inestable. Inclínese hacia delante al subir, e inclínese hacia atrás al bajar, gire el dial de control de velocidad a la posición baja. No conduzca en ángulo a través de una pendiente - conduzca siempre en línea recta hacia arriba y hacia abajo.

Nota:

- ⚠ Cuando utilice su silla eléctrica en calles o aceras, se aplicarán las leyes y normativas locales.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- ⚠ **OBLIGATORIO** Este manual de usuario completo debe leerse y comprenderse en su totalidad antes de utilizar y conducir la silla eléctrica.

ADVERTENCIA Desobedecer las instrucciones descritas en este manual puede provocar daños en la silla eléctrica o lesiones corporales al usuario.

- ⚠ Tampoco deben utilizarla personas que padezcan limitaciones físicas o mentales evidentes que les incapaciten para manejar con seguridad la silla eléctrica en el tráfico.

⚠ **ADVERTENCIA** No supere nunca la carga máxima admisible - ver Especificaciones.

⚠ **ADVERTENCIA** No conduzca nunca la silla eléctrica bajo los efectos de medicamentos o alcohol.

Si está tomando medicación, compruebe con su médico que su capacidad para controlar la silla eléctrica no se verá afectada.

- ⚠ Inspeccione todas las conexiones eléctricas, todas las conexiones del controlador, los frenos y la carga de la batería para conocer el tacto de su silla eléctrica y sus capacidades como Comprobación de Seguridad Previa a la Conducción.

⚠ Diseñado exclusivamente para un solo uso; sin peso extra ni personas adicionales.

ADVERTENCIA Nunca intente subirse o bajarse de su silla eléctrica sin antes apagar el mando Joystick. Esto evitará que la silla eléctrica se mueva si se produce un contacto accidental con el mando Joystick.

⚠ **ATENCIÓN** No descienda ni suba nunca una pendiente superior a la máxima recomendada véase (3.4)

Especificaciones.




2. ATENCIÓN

ATENCIÓN No atravesese nunca una pendiente, rampa, etc., en ninguna dirección.


ADVERTENCIA No utilice nunca la silla eléctrica sin las ruedas antivuelco correctamente instaladas.

ADVERTENCIA No utilice su silla eléctrica sobre arena, terrenos irregulares o superficies mojadas y resbaladizas.


 **ADVERTENCIA** Esta silla eléctrica no está diseñada para utilizarse como asiento en un vehículo a motor. La silla de ruedas podría fallar en un impacto con el vehículo, provocando lesiones al ocupante de la silla eléctrica o a otras personas.

ADVERTENCIA No utilice la silla eléctrica si está rota o no funciona correctamente.

ADVERTENCIA Antes de inclinarse o estirarse hacia delante, apoye siempre el trasero en el respaldo de la silla y mire hacia delante con las ruedas giratorias.

 **ADVERTENCIA** No se ponga nunca de pie sobre el reposapiés, ya que la silla eléctrica podría volcar y causar lesiones al usuario.

ADVERTENCIA Coloque siempre la silla eléctrica sobre una superficie estable y plana antes de realizar transferencias desde o hacia la silla eléctrica. **ADVERTENCIA** Las ruedas antivuelco sólo son efectivas sobre suelo firme. Se hundirán en terrenos blandos como






 hierba, nieve o barro si la silla eléctrica descansa sobre ellas. En tales superficies, las ruedas antivuelco no funcionarán como es debido y la silla eléctrica podría volcar.

ADVERTENCIA Un giro demasiado brusco de su silla eléctrica a gran velocidad le hará perder el control y el equilibrio y le hará provocar el vuelco de la silla eléctrica con resultado de lesiones graves o muerte.

2. ATENCIÓN

2.4 OBSERVACIONES SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM)

Queremos señalar que las fuentes de ondas electromagnéticas (por ejemplo, los teléfonos móviles) son susceptibles de crear interferencias. La electrónica de la propia silla eléctrica también podría afectar a otros aparatos eléctricos. Para reducir el efecto de las fuentes electromagnéticas de interferencia, por favor, lea las siguientes advertencias:

-  **ADVERTENCIA:** La silla eléctrica puede perturbar el funcionamiento de dispositivos de su entorno que emitan campos electromagnéticos.
-  **ADVERTENCIA:** Las prestaciones de conducción de la silla eléctrica pueden verse influidas por campos electromagnéticos (por ejemplo, generadores eléctricos o fuentes de alta potencia).
-  **ADVERTENCIA:** Evite utilizar cualquier televisor o radio portátil en el entorno inmediato de su fuente de alimentación.
silla mientras esté encendida.
-  **ADVERTENCIA:** Compruebe si hay antenas transmisoras en la zona y evite utilizar la silla eléctrica cerca de ellos.
-  **ADVERTENCIA:** Si se producen movimientos involuntarios o frenazos, apague la silla eléctrica en cuanto sea seguro hacerlo.

Los campos electromagnéticos interferentes pueden tener un efecto negativo en los sistemas electrónicos de la silla eléctrica. Estos pueden incluir:

- Desconexión del freno motor
- Comportamiento incontrolable de la silla eléctrica
- Movimientos involuntarios de la dirección

En presencia de campos interferentes muy intensos o duraderos, los sistemas electrónicos podrían incluso averiarse por completo o funcionar mal.

2.5 CONTROL DE SEGURIDAD PREVIO A LA CONDUCCIÓN

Familiarícese con la silla de ruedas de viaje y sus prestaciones. Le recomendamos que realice una comprobación de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que su silla de ruedas de viaje funciona de forma suave y segura.

Realice las siguientes inspecciones antes de utilizar su silla de ruedas de viaje:

- Compruebe el estado de los neumáticos. Asegúrese de que no estén dañados ni excesivamente desgastados.
- Compruebe todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que estén apretadas y no corroídas.
- Compruebe todas las conexiones del arnés. Asegúrese de que estén bien sujetas.
- Compruebe que los frenos funcionan correctamente.
- Compruebe el medidor de estado de las baterías para asegurarte de que están completamente cargadas.
- Asegúrese de que la palanca de rueda libre manual se encuentra en el modo de marcha antes de sentarse en la silla de ruedas de desplazamiento.

Si descubre algún problema, póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda. Consulte la información de contacto incluida en el paquete del propietario.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (HP200)

3.1.1 Este producto consta de chasis, ruedas, asiento, reposabrazos, batería de litio, motor y controlador con un diseño ligero y compacto. Toda la silla de ruedas puede plegarse con un solo botón y, una vez plegada, puede transportarse o rodar fácilmente. El reposabrazos puede abatirse hacia atrás, lo que facilita el desplazamiento de las personas mayores. También está equipada con un controlador de alto rendimiento, que las personas mayores pueden manejar con flexibilidad. La caja de la batería se puede extraer para cargarla.

3.1.2 Grado de resistencia al agua IPX4 y antichoque eléctrico: Parte aplicada de tipo B


3.1.3 Este producto está diseñado para simplificar su manejo y es de fácil utilización.

3.1.4 El respaldo y el asiento ergonómicos de malla elástica están diseñados para proporcionar un amplio confort al conductor.

3.1.5 Este producto es adecuado para su uso en interiores y en carreteras planas cerca de edificios.

3.2 ESTRUCTURA PRINCIPAL


3.2.1 NOMBRES DE LAS PIEZAS

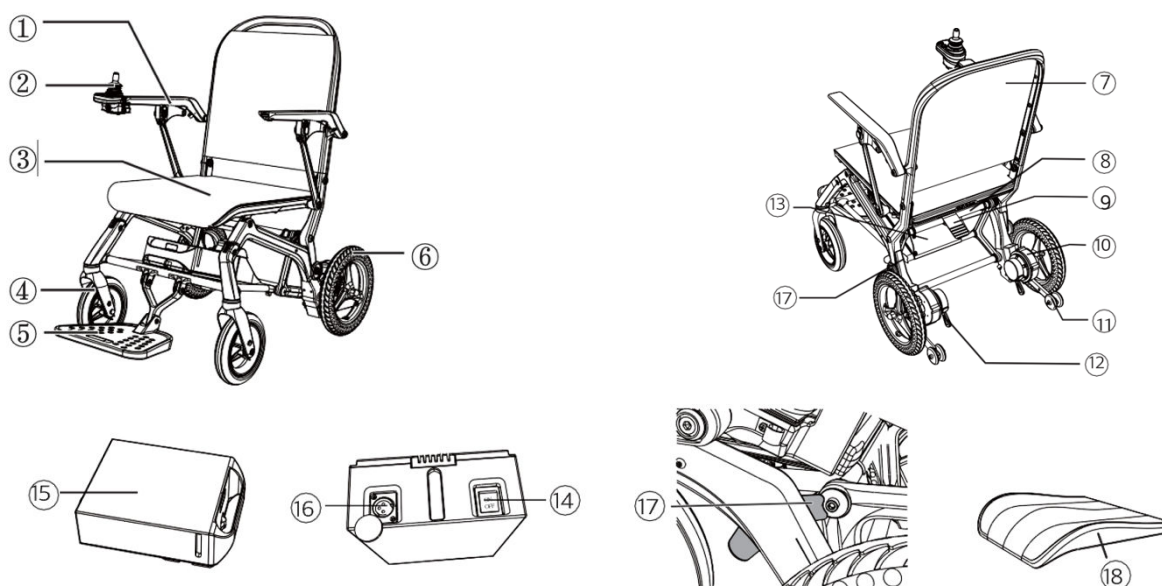

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Reposabrazos | 6. Rueda trasera | 11. Rueda antivuelco | 16. Puerto de carga |
| 2. Joystick | 7. Respaldo (malla elástica) | 12. Palanca de rueda libre | 17. Pieza de cerradura |
| 3. Asiento (malla elástica) | 8. Palanca de bloqueo | 13. Caja de la batería | 18. Cojín |
| 4. Rueda delantera | 9. Asa de cierre plegable | 14. Interruptor de la batería | |
| 5. Reposapiés | 10. Conjunto de la rueda trasera | 15. Batería | |

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.3 ESQUEMA DEL CIRCUITO

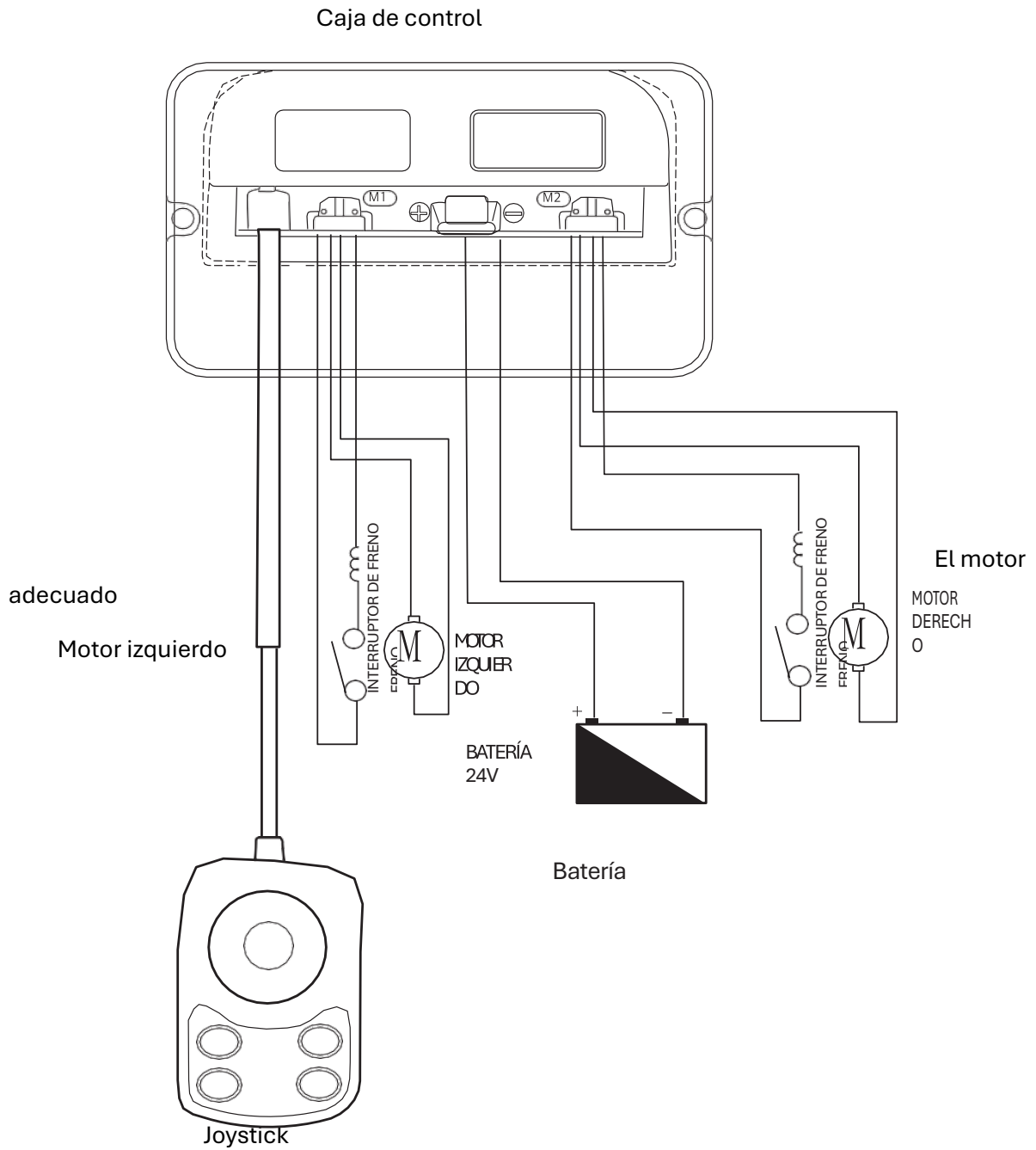

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.4 PARÁMETROS TÉCNICOS


Modelos técnicos	HP200
Marco	Fibra de carbono
Peso (p/batería)	14.5KG
Carga máxima	125 kg
Motor (potencia nominal de salida)	24V 170W
Batería	Batería de iones de litio de 24 V 20 Ah/10,4 Ah (opcional)
Cargador	29,4v 2A Cabeza de micrófono, Enchufe CA calibre medio
Rueda delantera	Neumático PU de 8
Rueda trasera	Neumáticos de 12" y llanta de fibra de carbono
Reposabrazos	Subir
Reposapiés	Plegable
Freno	Freno electromagnético
Cojín de asiento y respaldo	Malla elástica
Dimensiones abiertas	1000x620x950 (mm)
Dimensiones plegado	620x340x800 (mm)
Anchura del asiento	450 mm
Profundidad del asiento	450 mm
Altura del asiento sobre el suelo	480 mm
Altura del reposabrazos	250 mm
Altura del respaldo	520 mm
Velocidad máxima	6,0 km/h
Estabilidad estática	≥9°
Estabilidad dinámica	≥6°
Distancia de frenado en carretera horizontal	≤1.1 m
Comportamiento en pendiente	9°
Capacidad de escalada	≥6°(<12°)
Altura de paso de obstáculos	≥40 mm
Anchura de paso de la zanja	100 mm
Radio de giro mín.	≤900 mm
Distancia teórica de conducción (batería de 20 AH)	20 Km

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE


4.1 INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Inserte el soporte superior del joystick en el tubo fijo del reposabrazos como se muestra en el diagrama y luego apriételo con el pomo.


Accionar en sentido contrario si se maneja con la mano izquierda.

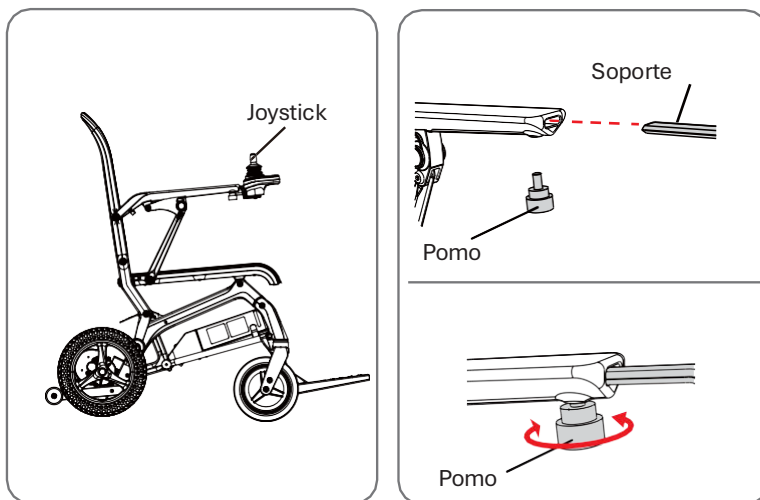




4.2 PALANCA DE RUEDA LIBRE MANUAL

Tire de las palancas de rueda libre la posición abierta  para poner la silla de ruedas en la posición de desbloqueo del freno y podrá empujar la silla de ruedas manualmente. Cuando se empuja la palanca a la posición cerrada, la silla de ruedas se encuentra en estado de frenado y no se puede empujar.

 **ADVERTENCIA:**

El freno debe estar en estado cerrado , es decir, la silla de ruedas puede arrancar cuando está en estado de frenado.

 Está prohibido utilizar la función de apertura de  cuando la silla de ruedas va cuesta arriba o cuesta abajo para garantizar la seguridad del usuario y de la silla de ruedas.

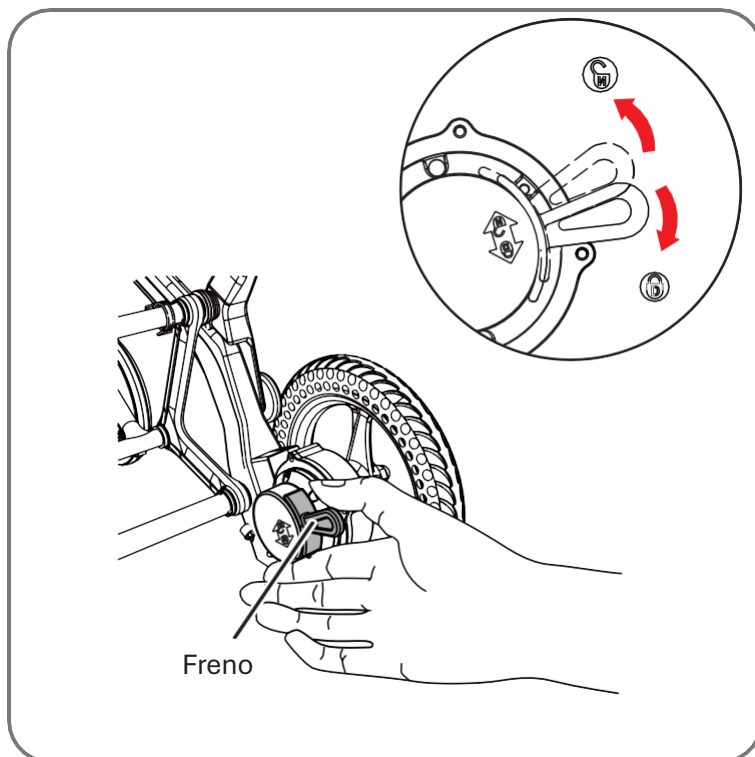


 **ADVERTENCIA:**

1. Apague el botón de encendido del controlador antes de cerrar los frenos y no se siente en el asiento mientras los frenos están abiertos. No abra los frenos cuando la silla de ruedas esté en una pendiente o en cualquier posición inclinada.
2. El sistema de frenos está en estado abierto cuando se abre el freno.
3. Cuando el freno está abierto, la silla de ruedas sólo puede empujarse sobre la superficie horizontal. A continuación, ponga el freno electromagnético en estado cerrado.

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE

4.3 INSTALACIÓN, EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA CAJA DE LA BATERÍA

4.3.1 INSTALACIÓN: Empuje la caja de la batería hacia delante a lo largo de la tira de fijación en forma de U y alinéela con el terminal delantero hasta que encaje en su sitio.

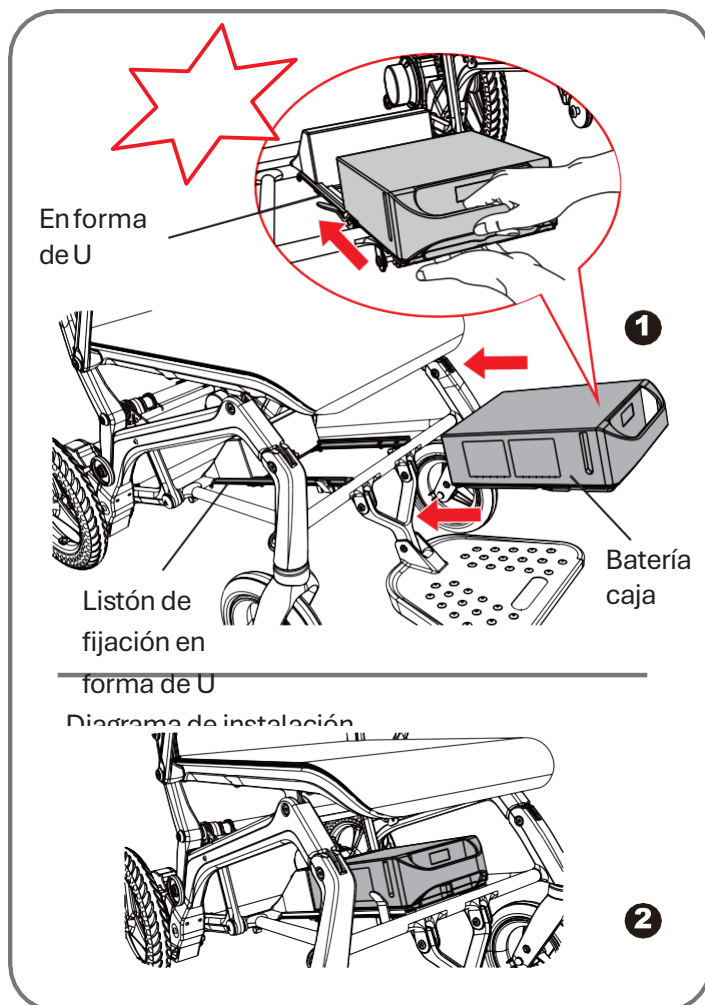


4.3.2 EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN Retire la caja de la batería presionando la palanca de bloqueo de la batería mientras tira de la caja de la batería hacia atrás a lo largo de la ranura.

Atención:

① **Al insertar la caja de la batería, el botón de la caja de la batería debe estar en el estado "ON", es decir, la alimentación está conectada.**


② **Sujete la batería con ambas manos para evitar que se caiga al instalarla o extraerla.**

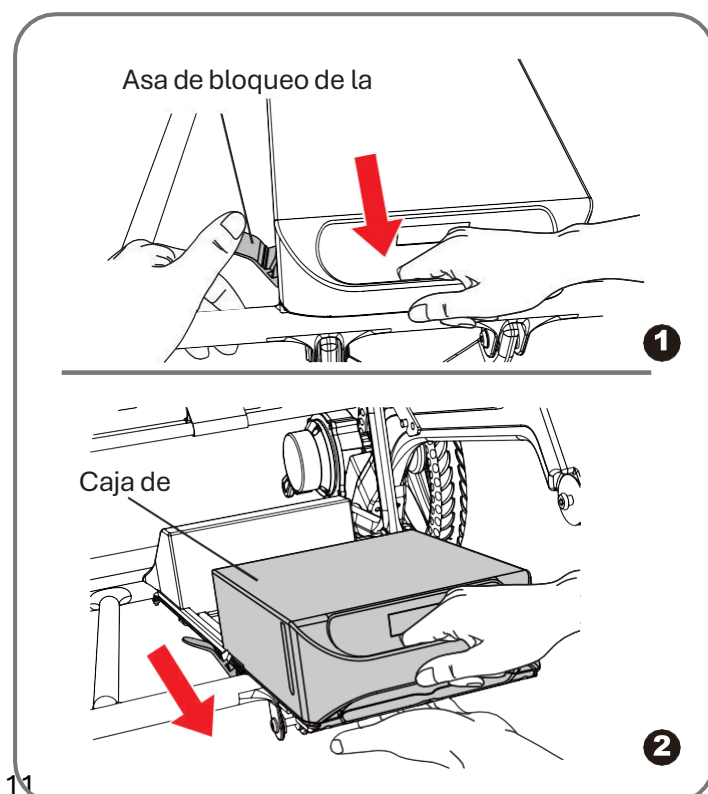

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE


4.4 DESMONTAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INSTALACIÓN

1. Sujete la hebilla del cinturón de seguridad y presione para desabrocharlo.
2. Alinee la hebilla con el inserto, presione hacia abajo hasta que oiga el "clic".

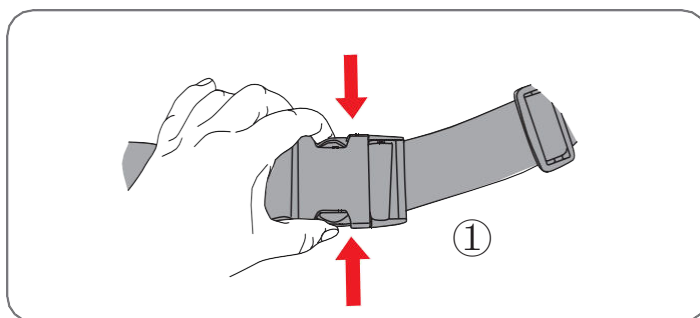


ADVERTENCIA

Por favor, abróchese el cinturón de seguridad cuando se siente en la silla de ruedas.

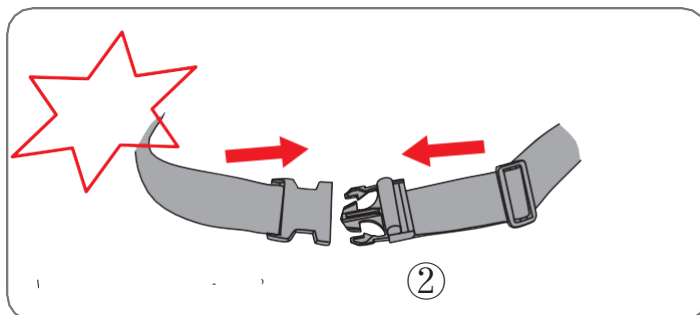

4.5 RUEDA ANTIVUELCO 4,5

1. La silla de ruedas está equipada con ruedas antivuelco, que sirven para evitar que la silla vuelque en caso de emergencia. Las ruedas antivuelco de esta silla de ruedas no se pueden desmontar.

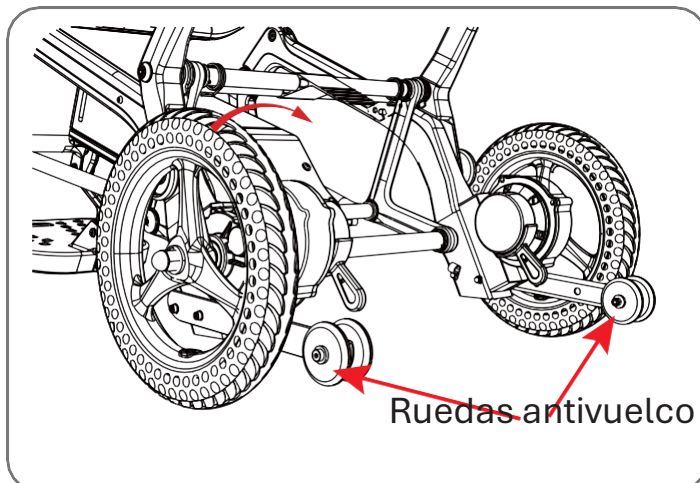

ADVERTENCIA



No conduzca la silla de ruedas si las ruedas antivuelco están desmontadas o dañadas.

ADVERTENCIA

Las ruedas antivuelco sólo son adecuadas para superficies duras. Si la carretera está embarrada, la rueda antivuelco puede atascarse.

4.5.1 ELEVACIÓN DEL REPOSABRAZOS


- ① Pulse el botón rojo del lateral.
- ② El reposabrazos puede levantarse o bajarse, lo que facilita subir y bajar de la silla de ruedas.

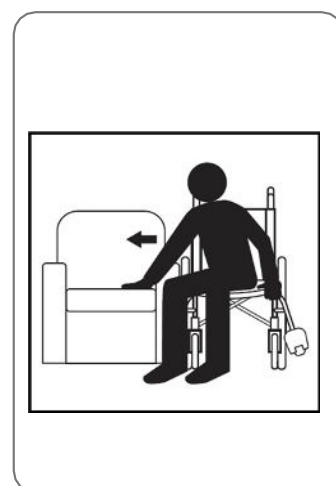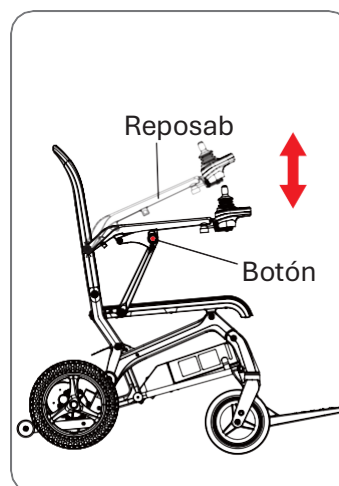

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE

4.6 DESPLIEGUE DE LA SILLA ELÉCTRICA


4.6.1 Sujete el marco del respaldo con la mano izquierda y abra el reposapiés con la mano derecha, tal como se muestra en el diagrama de la derecha.

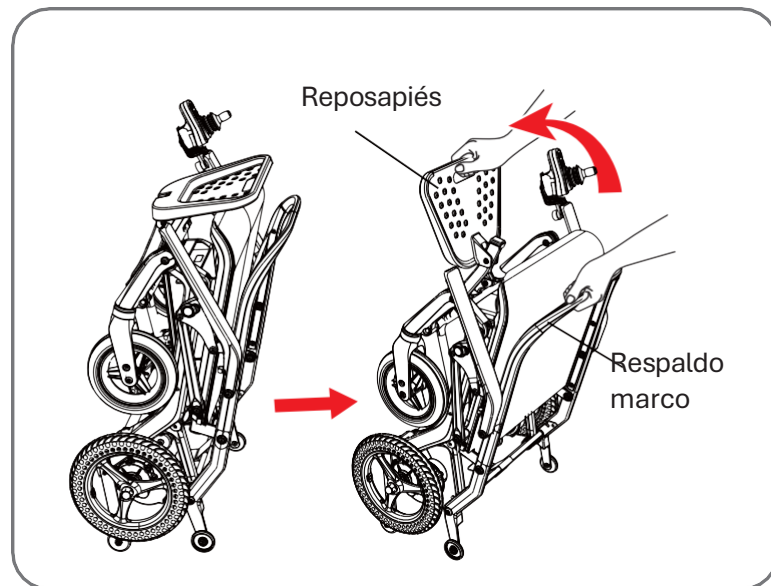

4.6.2 Antes de abrir la silla eléctrica, coloque todo el vehículo en posición horizontal.

① Presione la pieza de bloqueo con la mano derecha para escalonar el tornillo y la pieza de bloqueo.

② Al mismo tiempo, sujete el marco del respaldo con la mano izquierda y levántelo hacia arriba para desplegarlo hacia fuera. Una vez separado el tornillo de la pieza de bloqueo, puede soltarlo con la mano derecha.

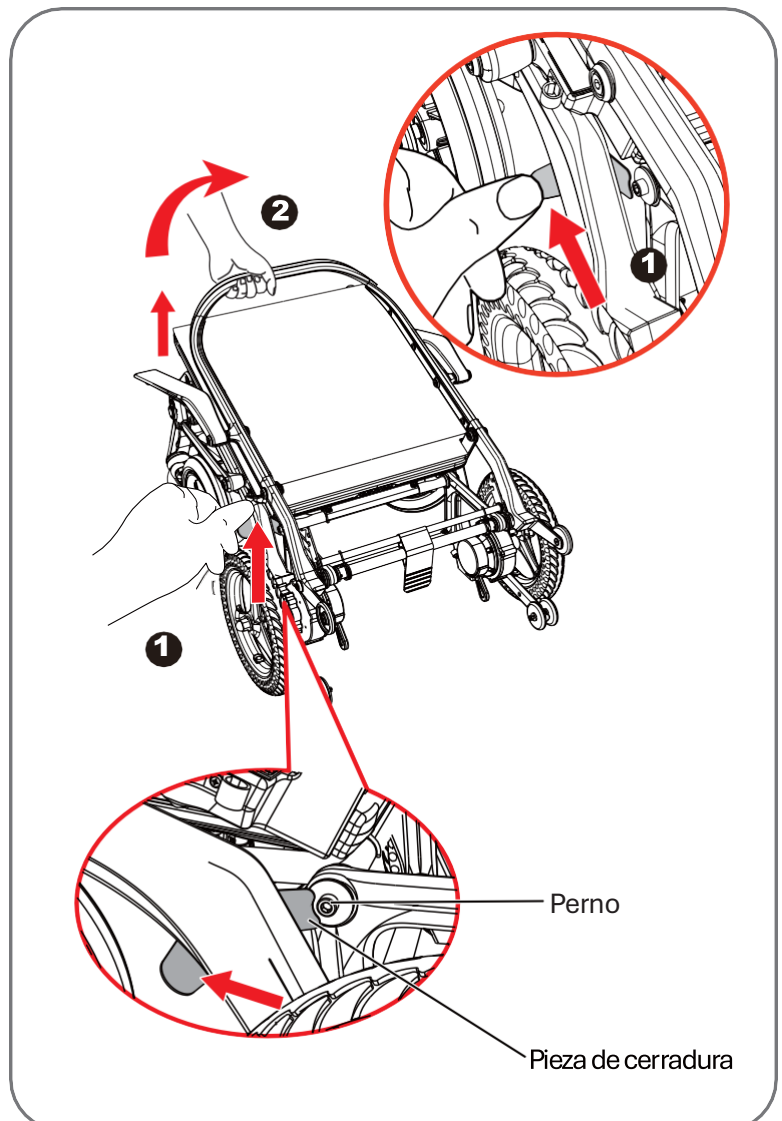


☞ Atención:

Al realizar el paso ②, suelte a tiempo la mano que tira de la cuerda de desbloqueo para evitar pellizcarse la mano.

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE

4.6.3 Cuando se abre el armazón del respaldo, la silla de ruedas está completamente abierta cuando se oye un "clic" y el gancho encaja en su sitio.

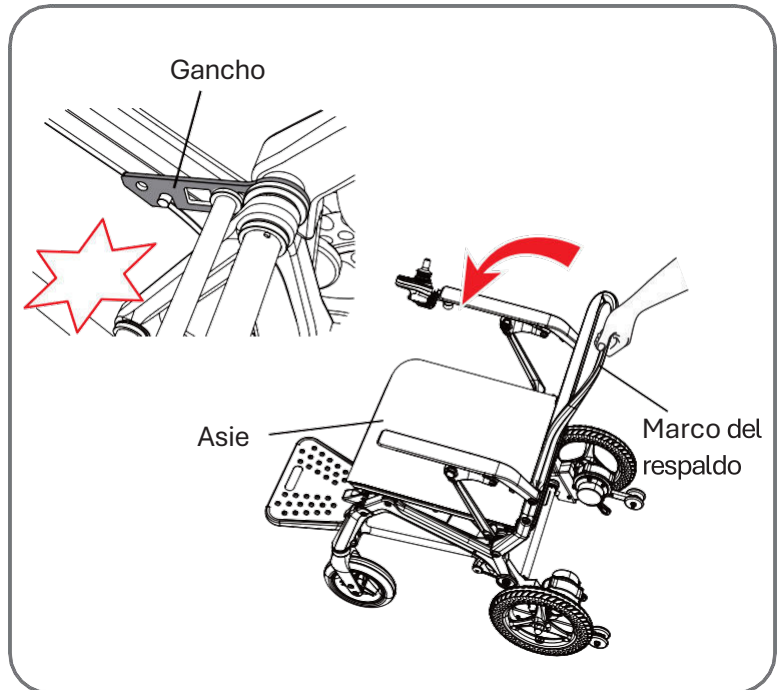

4.6.4 La silla de ruedas está completamente abierta.



4. INSTALACIÓN Y AJUSTE

4.7 PLEGAR LA SILLA DE RUEDAS


Atención:

Retire el cojín para poder plegar la silla fácilmente.

4.7.1 Baje el asa de bloqueo abatible con el pie derecho y, al mismo tiempo, sujete el armazón del respaldo con la mano derecha y empújelo hacia delante hasta que se suelten los ganchos situados a ambos lados de la silla de ruedas, tal y como se muestra en el diagrama de la derecha.


4.7.2 Una vez liberados los ganchos, levante el pie para soltar el asa de bloqueo plegable. Sujete el marco del respaldo con la mano derecha y pliéguelo hacia abajo, hacia la parte delantera, y ciérrelo como se muestra en el diagrama de la derecha.

4.7.3 Cuando está plegada y se oye el "clic", la pieza de bloqueo bloquea los tornillos y bloquea la silla de ruedas, de modo que no se abrirá automáticamente.

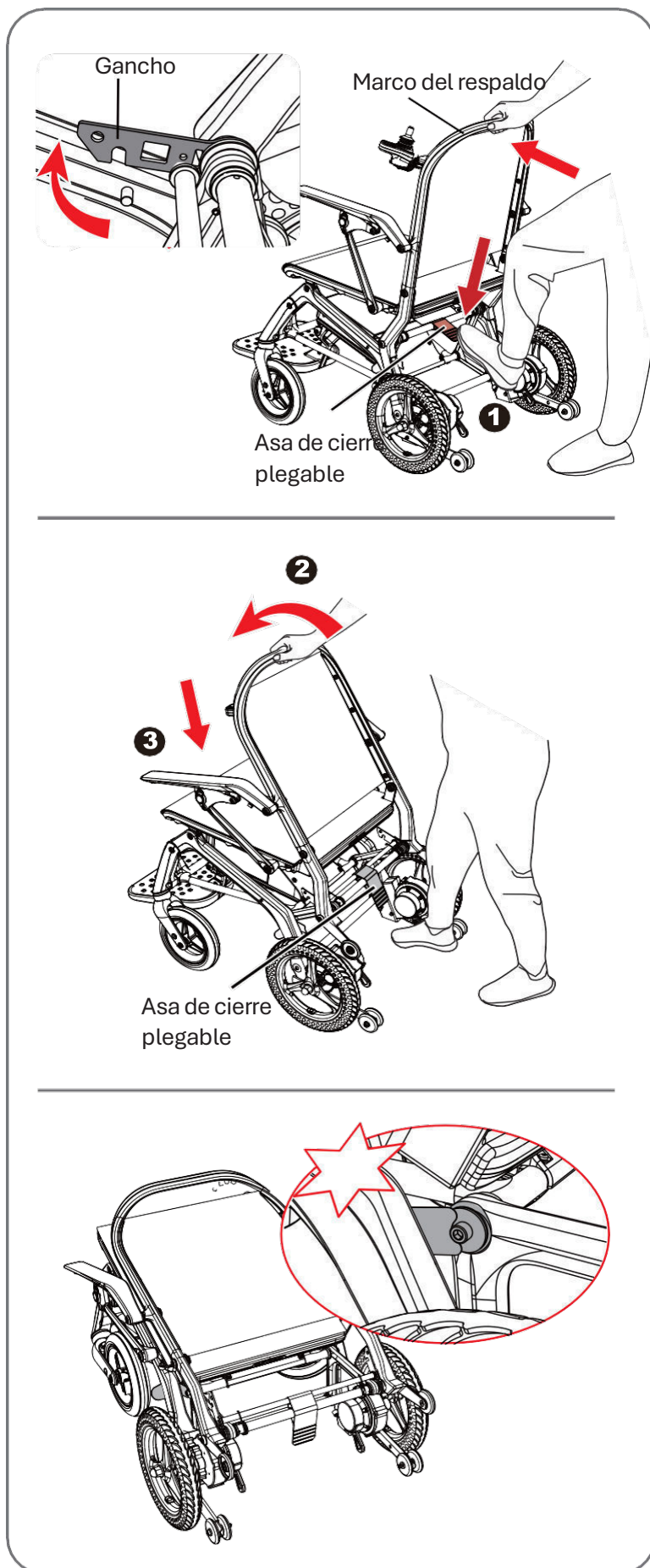

4. INSTALACIÓN Y AJUSTE

4.7.4 Una vez plegado, vuelva a girar el reposapiés hacia dentro y móntelo como se muestra en el diagrama de la derecha.

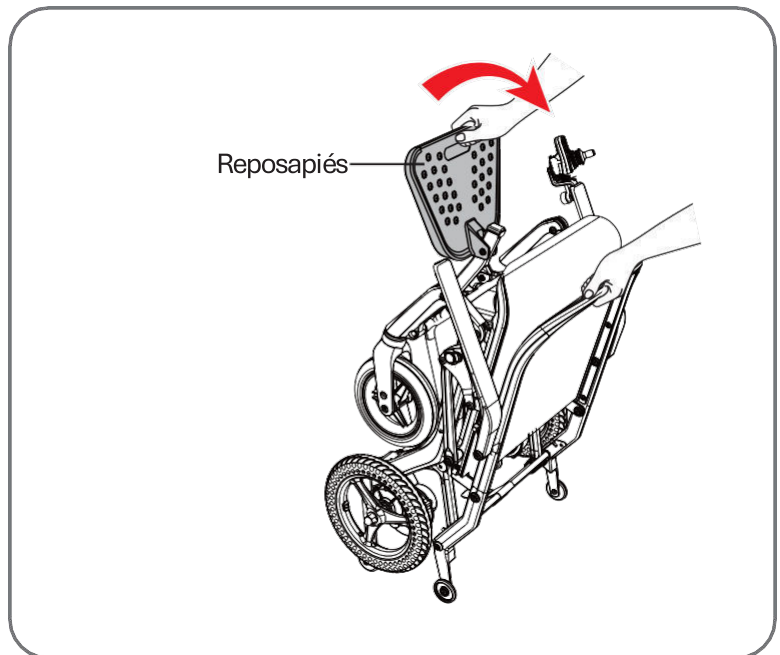


4.8 PONER DE PIE LA SILLA DE RUEDAS PLEGADA

Una vez plegada, la silla de ruedas puede guardarse verticalmente para ahorrar espacio de almacenamiento.

ADVERTENCIA

1. Antes de abrir o plegar la silla de ruedas, asegúrese de que no haya obstáculos alrededor de la misma.
2. Asegúrese siempre de que sus dedos están alejados de las articulaciones mecánicas de la silla de ruedas plegada antes de abrirla o plegarla para evitar pellizcarse las manos.
3. No se siente en el asiento ni conduzca la silla antes de que la silla plegada esté completamente abierta.
4. Asegúrese de que la silla de ruedas está completamente abierta antes de sentarse en ella o conducirla.

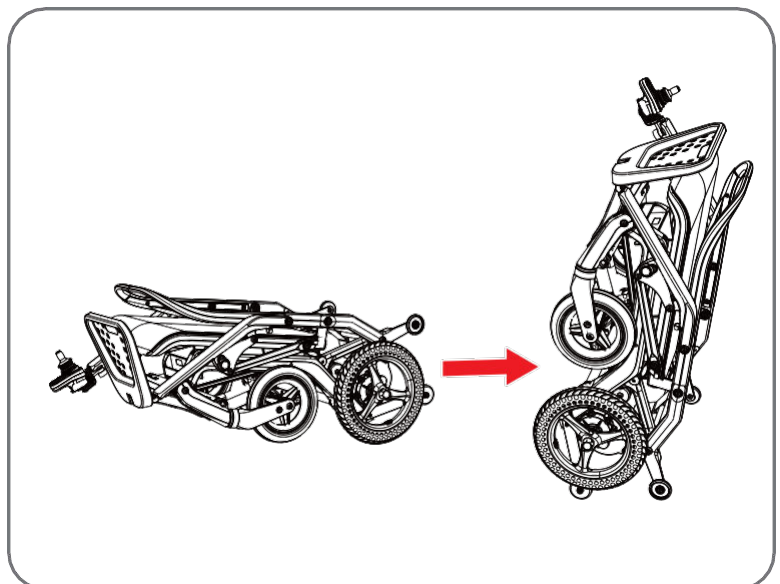

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 FUNCIONAMIENTO - CONDUCCIÓN DE LA SILLA ELÉCTRICA

5.1.1 JOYSTICK



1. Botón de baja velocidad	5. Botón del claxon
2. Botón de encendido/apagado	6. Botón de alta velocidad
3. Indicador de batería	7. Palanca del joystick
4. Indicador de velocidad	

1. **BOTÓN DE BAJA VELOCIDAD:** Púlselo para reducir la velocidad.
2. **Botón ON/OFF:** Púlselo una vez para encender la silla eléctrica y púlselo una vez para apagarla.
3. **INDICADOR DE BATERÍA:** Indica el voltaje de la batería. El color verde indica que la batería está completamente cargada; el ámbar indica que está medio cargada y el rojo indica que la batería necesita cargarse.
4. **INDICADOR DE VELOCIDAD:** Indica la velocidad ajustada con los botones 'Velocidad lenta' o 'Aumentar velocidad'.
5. **BOTÓN DE LA BOCINA:** Este botón activa una bocina de advertencia.
6. **BOTÓN DE VELOCIDAD ALTA:** Púlselo para aumentar la velocidad.
7. **PALANCA DEL JOYSTICK:** La palanca del Joystick determina la dirección en la que te desplazas. Empuja hacia delante para avanzar, tira hacia atrás para retroceder, hacia la izquierda para ir a la izquierda y hacia la derecha para ir a la derecha.

5. INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA

Está prohibido desconectar la alimentación durante la conducción, ya que esta operación hará que la silla eléctrica se detenga repentinamente y posiblemente vuelque.

5.2 ANTES DE SENTARSE EN LA SILLA ELÉCTRICA

- Asegúrese de que el interruptor de la caja de la batería está en la posición "On".
- Asegúrese de que las palancas de rueda libre están en la posición "Lock" (véase 4.2 Palanca de rueda libre manual).
- Asegúrate de que la batería está completamente cargada.
- Asegure el cinturón de seguridad.
- Asegúrese de que la silla eléctrica está completamente abierta y de que los tubos del asiento están situados correctamente en los soportes laterales (véase 4.6 Despliegue de la silla eléctrica).
- Asegúrese de que la palanca del joystick está apagada para evitar que la silla eléctrica se mueva si se produce un contacto accidental del Joystick.

5.3 PUESTA EN MARCHA

- Asegúrese de que está sentado de forma segura.
- Asegúrate de que los reposapiés están colocados a la altura correcta para tus pies.

5.4 DIRECCIÓN

- El Joystick le permite dirigir la silla eléctrica. Le recomendamos que reduzca el ajuste de velocidad a la velocidad más baja hasta que haya adquirido experiencia y práctica en el manejo de la silla eléctrica.
- Asegúrese de mantener una distancia suficiente al girar la silla eléctrica para que las ruedas traseras queden libres de obstáculos.
- Tenga aún más cuidado al maniobrar y conducir marcha atrás.

5.5 CONDUCCIÓN EN PENDIENTES, CUESTAS Y RAMPAS

- Cuando conduzca su silla eléctrica, no descienda ni suba nunca una pendiente superior a la recomendada: Véase 4.0 Especificaciones.
- Suba o baje siempre en línea recta una pendiente, rampa, etc.
- No atraviese nunca una pendiente, rampa, etc., en ninguna dirección: si atraviesa una pendiente, rampa, etc., la silla podría volcar y provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- Intente mantener la silla eléctrica en movimiento al subir o bajar una pendiente. Si debe detenerse, vuelva a arrancar y acelere despacio y con cuidado.

ATENCIÓN Al circular por pendientes, la distancia de frenado de la silla eléctrica puede ser

considerablemente mayor que en terreno llano.

6. BATERÍA Y CARGADOR

6.1 INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE CARGA

Su silla eléctrica utiliza una batería de iones de litio de larga duración. Esta batería está sellada y no necesita mantenimiento. Al estar sellada, no es necesario comprobar el nivel de electrolito (líquido). Las baterías de iones de litio están diseñadas para soportar descargas más largas y profundas. Aunque su aspecto es similar al de las baterías de automoción, no son intercambiables. Las baterías de automóvil no están diseñadas para soportar una descarga larga y profunda, y no son seguras para su uso en sillas eléctricas.



OBLIGATORIO Los bornes, terminales y accesorios relacionados de las baterías pueden contener plomo y compuestos de plomo. Utilice gafas y guantes cuando manipule las baterías y lávese las manos después de manipularlas.



ADVERTENCIA Póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride si tiene alguna duda sobre la batería de su silla eléctrica.

Cargar la batería

El cargador de batería es esencial para proporcionar una larga vida a la batería de su silla eléctrica. Está diseñado para optimizar el rendimiento de su silla eléctrica cargando la batería de forma segura, rápida y sencilla. El cargador de batería sólo funciona cuando el cable de alimentación del cargador está enchufado a una toma de corriente.



PROHIBIDO La extracción de la clavija de conexión a tierra puede crear riesgos eléctricos. Si es necesario, instale correctamente un adaptador aprobado de 3 clavijas en una toma de corriente que tenga acceso a un enchufe de 2 clavijas.



PROHIBIDO No utilice nunca un alargador para enchufar el cargador de baterías. Enchufe el cargador directamente a una toma de corriente estándar correctamente cableada.



PROHIBIDO No permita que niños sin supervisión jueguen cerca de la silla eléctrica mientras la batería se está cargando. Pride recomienda que no cargue la batería mientras la silla eléctrica esté ocupada.



¡OBLIGATORIO! Lea las instrucciones de carga de la batería en este manual y en el manual suministrado con el cargador de la batería antes de cargar la batería.



ADVERTENCIA Durante la carga de la batería pueden generarse gases explosivos. Mantenga la silla eléctrica y el cargador de la batería alejados de fuentes de ignición como flamas o chispas y proporcione una ventilación adecuada cuando cargue la batería.

ADVERTENCIA Debe recargar la batería de su silla eléctrica con el cargador externo suministrado. No utilice un cargador de batería tipo automóvil.



ADVERTENCIA Inspeccione el cargador de batería, el cableado y los conectores para ver si están dañados antes de cada uso. Póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride si encuentra daños.

6. BATERÍA Y CARGADOR

ADVERTENCIA No intente abrir la caja del cargador de batería. Si el cargador de batería no parece funcionar correctamente, póngase en contacto con su proveedor autorizado Pride.

ADVERTENCIA Tenga en cuenta que la carcasa del cargador de baterías puede calentarse durante la carga. Evite el contacto con la piel y no lo coloque sobre superficies que puedan verse afectadas por el calor.

ADVERTENCIA Si el cargador de baterías está equipado con ranuras de refrigeración, no intente introducir objetos por dichas ranuras.





ADVERTENCIA Si su cargador de baterías no ha sido probado y aprobado para su uso en exteriores, no lo exponga a condiciones climáticas adversas o extremas. Si el cargador de baterías se expone a condiciones climáticas adversas o extremas, entonces se debe permitir que se ajuste a la diferencia en las condiciones ambientales antes de utilizarlo en interiores. Consulte el manual suministrado con el cargador de baterías para obtener más información.

6. BATERÍA Y CARGADOR

NOTA: La batería de Jazzy® Ultra-Lite se puede cargar con la caja de la batería instalada o retirada de la base de alimentación.

6.2 CARGAR LAS BATERÍAS

- Asegúrate de leer y comprender el manual de usuario del cargador de baterías, si se suministra, así como las notas de seguridad del cargador.
- Apague la silla eléctrica.
- Decide qué toma de carga utilizar. Tienes 2 opciones:
 1. Enchufe de caja de baterías (permite cargar las baterías "fuera de la unidad", por ejemplo, en casa) (Fig. 6.2.1)
 2. Toma de carga del controlador (evita tener que agacharse para enchufar el cargador) (Fig. 6.2.2)

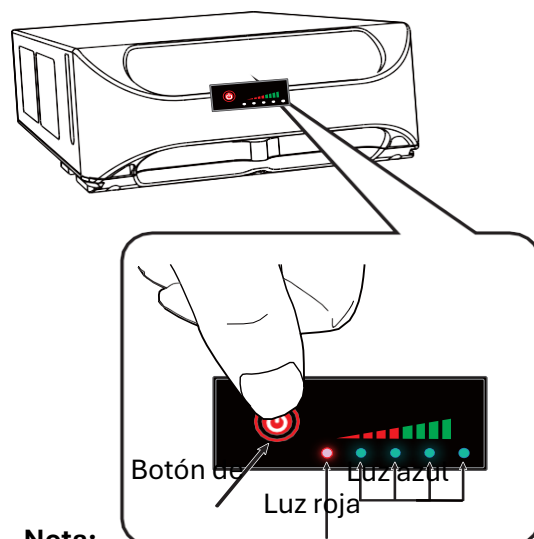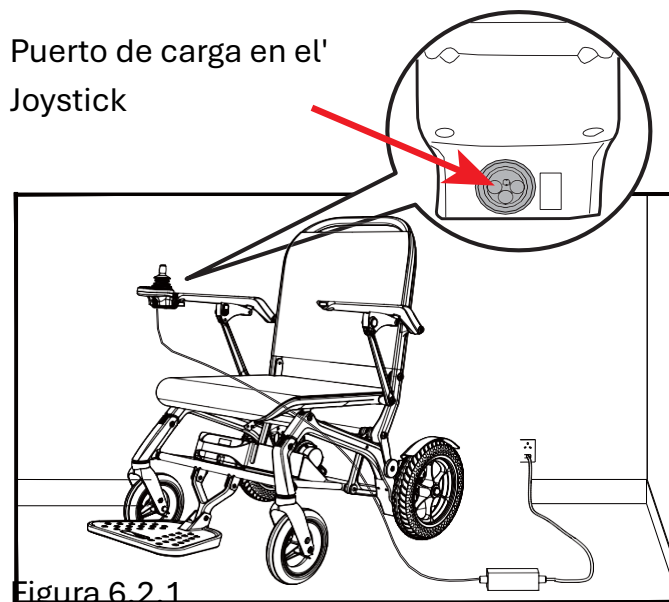


Nota:

Cuando quieras comprobar la potencia, el botón de la caja de la batería debe estar en "ON", entonces pulsa el botón de encendido, el indicador de potencia se encenderá y podrás comprobar la potencia.

Nota: El indicador se apagará automáticamente transcurridos 5 segundos.

1. El indicador verde indica que la batería está cargada
2. Cuando los últimos cuatro indicadores verdes están apagados, significa que la energía es baja, y la batería necesita ser cargada

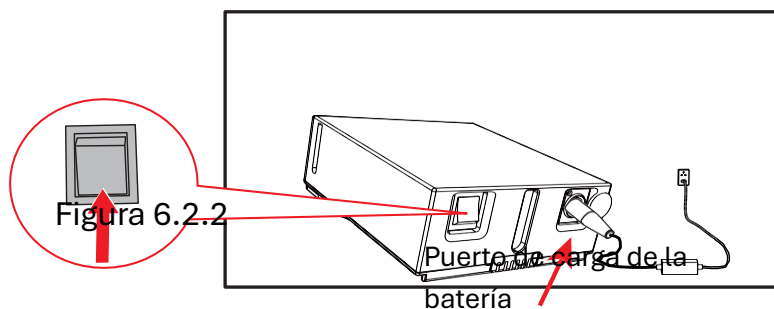

Nota: El botón de la caja de la batería debe estar en "ON" durante la carga, es decir, cargando con la alimentación conectada.

6. BATERÍA Y CARGADOR



ADVERTENCIA: Encienda el interruptor de la caja de la batería antes de cargarla.

- Coloca el enchufe del cargador en la toma de corriente.
- No encienda el cargador de baterías hasta que todos los enchufes estén en su posición.
- Desconecte la alimentación de red del cargador antes de retirar el enchufe del cargador de carga salida.



ADVERTENCIA Riesgo de explosión y destrucción de las baterías si se utiliza un cargador incorrecto. Utilice únicamente el cargador de baterías suministrado con el vehículo o un cargador homologado por el fabricante.



ADVERTENCIA No utilice ni guarde la batería cerca de fuentes de calor, como un fuego o un calefactor.



ADVERTENCIA Nunca intente abrir o desmontar el cargador. Si el cargador de baterías no parece funcionar correctamente, póngase en contacto con su proveedor autorizado.



ADVERTENCIA No utilice la batería si desprende olor, genera calor o presenta algún tipo de anomalía. Si la batería se está utilizando o recargando, retírela inmediatamente del aparato o del cargador e interrumpa su uso.



ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica y daños en el cargador de baterías si se moja. Proteja siempre el cargador de baterías del agua y cárguelo siempre en un entorno seco.

6. BATERÍA Y CARGADOR

6.3 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

¿Cómo funciona el cargador?

El cargador de batería toma el voltaje estándar de la toma eléctrica (corriente alterna) y lo convierte en 24V DC (corriente continua). La batería utiliza una corriente continua para hacer funcionar su silla eléctrica. Cuando el voltaje de la batería es bajo, el cargador trabaja más duro para cargar la batería. A medida que el voltaje de la batería se acerca a la carga completa, el cargador no trabaja tanto para completar el ciclo de carga. Cuando la batería está completamente cargada, el amperaje del cargador es casi cero. Así es como el cargador mantiene la carga pero no sobrecarga la batería.

¿Puedo utilizar otro cargador de batería?

Debe utilizar el cargador suministrado con la silla eléctrica. Es la herramienta más segura y eficaz para cargar la batería. No recomendamos el uso de otro tipo de cargadores (por ejemplo, un cargador de batería de automóvil).

NOTA: El cargador de su silla eléctrica no funcionará después de que la batería se haya descargado a casi “cero capacidad”. Si esto ocurre, llame a un proveedor autorizado Pride para obtener ayuda.

¿Con qué frecuencia debo cargar la batería?

Hay muchos factores que entran en juego a la hora de decidir con qué frecuencia cargar la batería. Puede que utilices tu silla eléctrica todo el día a diario o que no la uses durante semanas seguidas.

④ **Uso diario**

Si utiliza su silla eléctrica a diario, cargue la batería en cuanto termine de utilizarla. Su silla eléctrica estará lista cada mañana para ofrecerle un día completo de servicio. Se recomienda que cargue la batería por lo menos de 8 a 14 horas después del uso diario. Pride recomienda que cargue su batería durante 4 horas adicionales después de que el cargador de batería indique que la carga esta completa.

6. BATERÍA Y CARGADOR

■ De uso frecuente

Si utiliza la silla eléctrica con poca frecuencia (una vez a la semana o menos), debe cargar la batería al menos una vez a la semana durante 12 a 14 horas.

NOTA: Mantenga la batería completamente cargada y evite una descarga profunda de la misma. Consulte las instrucciones de carga en el manual suministrado con el cargador de baterías.

¿Cómo puedo conseguir la máxima autonomía o distancia por carga?

Rara vez se da una situación de conducción ideal, como un terreno liso, llano y duro, sin viento, colinas ni curvas. Es más frecuente encontrarse con colinas, grietas en el pavimento, superficies irregulares y poco compactas, curvas y viento. Todos estos factores afectarán a la distancia o al tiempo de funcionamiento por carga de batería. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para obtener la máxima autonomía por carga:

- Cargue siempre la batería por completo antes del viaje.
- Planifique su viaje con antelación para evitar las pendientes si es posible.
- Limite el peso del equipaje a los artículos esenciales.
- Intente mantener una velocidad uniforme y evite las paradas y arranques.

¿Qué tipo de batería debo utilizar?

Recomendamos una batería de iones de litio suministrada por Pride que esté sellada y no requiera mantenimiento. Consulte la tabla de especificaciones para obtener más información sobre la batería utilizada con su silla eléctrica.



ADVERTENCIA Las pilas contienen productos químicos corrosivos. Utilice únicamente baterías de iones de litio para reducir el riesgo de fugas o de explosión.

¿Por qué mi batería nueva parece débil?

Al igual que las baterías de níquel-cadmio, las de iones de litio tienen efecto "memoria". Las baterías de iones de litio están diseñadas específicamente para suministrar energía, agotar su carga y, a continuación, aceptar una recarga relativamente rápida. Si las pilas se recargan continuamente después de haberse descargado sólo parcialmente, pierden su capacidad de mantener una carga completa.

Trabajamos estrechamente con nuestro fabricante de baterías para proporcionar la batería que mejor se adapte a las demandas específicas de su silla eléctrica. Las baterías frescas llegan regularmente a Pride y se envían rápidamente con una carga completa. Durante el transporte, la batería se encuentra con temperaturas extremas que pueden influir en el rendimiento inicial. El calor roba la carga de la batería, y el frío ralentiza la potencia disponible y prolonga el tiempo necesario para recargar la batería (al igual que con una batería de coche).

La temperatura de la batería puede tardar unos días en estabilizarse y ajustarse a su nueva temperatura ambiente. Y lo que es más importante, se necesitarán unos cuantos "ciclos de carga" (una descarga completa y una recarga completa) para establecer el equilibrio químico crítico que es esencial para el máximo rendimiento y la larga vida útil de la batería. Merece la pena tomarse el tiempo necesario para que la batería se adapte correctamente.

¿Cómo puedo garantizar la máxima duración de la batería?

Una batería completamente cargada proporcionará un rendimiento fiable y una mayor duración de la batería. Mantenga la batería de su silla eléctrica completamente cargada siempre que sea posible. Las baterías que se cargan con poca frecuencia, que se cargan repetidamente después de una descarga parcial o que se almacenan sin una carga completa pueden dañarse permanentemente, causando un funcionamiento poco fiable de la silla eléctrica y una vida útil limitada de la batería.

6. BATERÍA Y CARGADOR

NOTA: *La vida útil de una pila suele ser un reflejo del cuidado que recibe.*

¿Cómo debo guardar mi silla eléctrica y su batería?

Si no utiliza su silla eléctrica con regularidad, le recomendamos que mantenga la vitalidad de la batería cargándola al menos una vez a la semana.

Si no va a utilizar su silla eléctrica durante un largo periodo de tiempo, cargue completamente la batería antes de guardarla. Coloque el interruptor de la batería en la posición de apagado o "0", desconecte la batería y guarde la silla eléctrica en un lugar cálido y seco. Evite las temperaturas extremas, como la congelación o el calor excesivo, y nunca intente cargar una batería congelada. Una batería fría o congelada debe calentarse durante varios días antes de recargarla.

¿Y el transporte público?

Las baterías de iones de litio suministradas por Pride están diseñadas para su uso en sillas eléctricas y otros vehículos de movilidad. El transporte de este artículo en aviones comerciales está sujeto a la normativa federal y a la política de la compañía aérea. Le sugerimos que se ponga en contacto con el mostrador de la compañía aérea con antelación para determinar los requisitos específicos de dicha compañía y asegurarse de que su silla eléctrica y su batería de iones de litio están permitidas.

¿Y los gastos de envío?

Si desea utilizar una empresa de transporte para enviar su silla eléctrica a su destino, vuelva a embalar su silla eléctrica en el contenedor de envío original si es posible y envíe la batería en una caja separada.

7. COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO DIARIOS

Proteja su silla eléctrica haciéndola revisar regularmente. Le recomendamos encarecidamente que haga revisar su silla eléctrica al menos una vez al año por un distribuidor cualificado, que sólo utilizará las piezas de recambio correctas. Esta inspección periódica le garantizará que la silla eléctrica funcionará con seguridad durante años. Hay muchas cosas que puede hacer usted mismo para mantener su silla eléctrica en óptimas condiciones. Si revisa regularmente la silla de ruedas y realiza (pequeños) trabajos de mantenimiento, prolongará su vida útil y aumentará la facilidad de uso.

7.1 NEUMÁTICOS Y RUEDAS

- Examine periódicamente el desgaste de los neumáticos y sustitúyalos cuando sea necesario.
- Asegúrese de que las ruedas pueden moverse libremente sin tocar nada. La rueda delantera y la horquilla deben moverse libremente para garantizar una conducción suave.

7.2 MOTOR

- ¿Hay algún ruido anormal en el motor? ¿Funciona correctamente el freno electromagnético?

7.3 MARCO TRANSVERSAL

- Comprueba que el bastidor transversal de la silla de ruedas está en buen estado. Asegúrate de que la silla de ruedas es fácil de plegar y desplegar.

7.4 INDICADOR DE BATERÍA

- ¿Se pone en verde el indicador cuando se enciende?
- ¿La potencia restante es suficiente para tu viaje?

7.5 BOTÓN DEL CLAXON

- ¿Funciona correctamente?

7.6 TAPICERÍA

- Comprueba si el tejido presenta agujeros, grietas o puntos desgastados.
- Compruebe que los ojales de montaje de la tapicería estén correctamente alineados y asegurados.

7.7 LIMPIEZA


- Limpie regularmente la tapicería, el chasis, los componentes de plástico y las piezas no eléctricas de la silla eléctrica con un paño seco o húmedo.
- No utilice agua, aceite u otras soluciones químicas para limpiar su silla eléctrica. Asegúrese de NO rociar la silla eléctrica con agua, ya que podría dañar los componentes electrónicos. Limpie la silla eléctrica con un paño seco o húmedo.
- Por favor, lleve la silla eléctrica a un distribuidor autorizado para reparaciones y ajustes. Los ajustes inadecuados podrían provocar accidentes y el mal funcionamiento de la silla eléctrica.

7.8 NÚMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

- Su silla eléctrica tiene un número de identificación único que se encuentra en diferentes lugares del chasis y de la caja de la batería. Este número único permitirá a su proveedor autorizado confirmar con el fabricante, si es necesario, la edad de su silla eléctrica y cuándo fue comprada.

7.9 FIN DE USO



El símbolo significa que el producto debe desecharse por separado de los residuos domésticos de acuerdo con las leyes y normativas locales. Al final de la vida útil de la silla de ruedas, llévela a  el lugar de reciclaje designado. La clasificación y el reciclaje ayudarán a conservar

7. COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO DIARIOS

recursos y garantizar que se recicla de forma respetuosa con el medio ambiente. El reciclaje de cada pieza deben ser manipulados por una organización de reciclaje autorizada de acuerdo con las leyes y normativas locales. En cuanto a las piezas de plástico, bastidor y tubos, pueden entregarse a unidades de reciclaje profesionales para su eliminación una vez finalizado su uso.

8. GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA. NOTA IMPORTANTE: PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA, DEBE CUMPLIMENTARSE Y DEVOLVERSE AL DISTRIBUIDOR EN UN PLAZO DE 14 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

8.1 GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Durante un (1) año a partir de la fecha de entrega, sustuiremos a nuestra discreción al comprador original, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente electrónico que, tras ser examinado por un representante autorizado del fabricante, resulte defectuoso.

- 1.Marco principal
- 2.Controladores electrónicos
- 3.Motor
- 4.Freno magnético electrónico
- 5.Cargador
- 6.Cualquier otro subconjunto eléctrico

NOTA: Si se produce un aumento en el nivel de ruido del motor/transeje, la garantía no es aplicable. El aumento del nivel de ruido de funcionamiento suele deberse a un esfuerzo excesivo de la silla eléctrica.

8.2 BATERÍAS

Las baterías están cubiertas por una garantía de seis (6) meses del fabricante original y una garantía adicional de seis (6) meses.

Nota: No está cubierto el deterioro gradual del rendimiento debido a que las baterías se dejan en estado descargado, se dejan en condiciones de frío durante largos períodos de tiempo o se desgastan por un uso intensivo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

1. Cubrepiés de piezas de plástico.
2. Neumáticos y ruedas antivuelco.
3. Tapicería y asientos.
4. Fusibles.
5. Reparaciones y/o modificaciones realizadas en cualquier parte de la silla eléctrica sin el consentimiento específico y previo del Fabricante.
6. Circunstancias ajenas al fabricante.

Las exclusiones también incluyen componentes con daños causados por:

1. Contaminación (lluvia, etc.).
2. Abuso, uso indebido, accidente o negligencia.
3. Uso comercial o distinto del normal.
4. Funcionamiento, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

NOTA: La garantía no cubre el deterioro gradual del rendimiento debido a que la batería se ha dejado descargada, se ha dejado en condiciones de frío durante un período prolongado o se ha desgastado por un uso intensivo.

8.4 COMPROBACIONES DE SERVICIO Y SERVICIO DE GARANTÍA

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original. Su recibo original será necesario como prueba de compra antes de que se presten los servicios de garantía.

Esta garantía sólo cubre los fallos debidos a defectos en los materiales o en la mano de obra que se produzcan durante el uso normal y no cubre los daños que se produzcan durante el envío o los fallos causados por productos no suministrados por el fabricante o los fallos resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, manejo incorrecto, aplicación incorrecta, alteración, modificación, uso comercial o por cualquier persona que no sea un distribuidor autorizado, o daños atribuibles a causas de fuerza mayor.

El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los pesos, medidas u otros datos técnicos que figuran en este manual. Todas las cifras, medidas y capacidades mostradas en este manual son aproximadas y no constituyen especificaciones.

Importante

Esta garantía quedará anulada si se retira o altera la etiqueta con el número de serie original de la silla eléctrica.

Para validar la garantía, este formulario debe cumplimentarse en línea (si procede) o enviarse por correo al fabricante.

8. GARANTÍA

8.5 NOTIFICACIONES AL CONSUMIDOR

No existen otras garantías expresas. En la medida permitida por la ley, cualquier garantía implícita (incluyendo una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular) se limita a:

1. Un (1) año a partir del día de la compra.
2. Sólo reparación o sustitución de la pieza defectuosa.

8.6 REGISTROS DE MANTENIMIENTO

Registros de mantenimiento			
Fecha	Edición	Causa	Observación

Nombre:
Dirección: Teléfono:
Nombre del producto: Código de barras:
Fecha de compra:
Período de garantía: (Excepto piezas de desgaste) , Otras indicadas en el manual de instrucciones.

Nota: Por favor, diríjase al distribuidor para el registro de la garantía en el plazo de un mes, esta tarjeta será válida con el sello del distribuidor o del fabricante, y la garantía se llevará a cabo con esta tarjeta.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

9.1 CÓDIGO FLASH

Códigos de avería

Si se produce una desconexión del sistema, puede averiguar lo que ha ocurrido contando el número de parpadeos en el BDI del módulo Joystick.

A continuación, encontrará una lista de acciones de autoayuda. Intente utilizar esta lista antes de ponerse en contacto con el servicio técnico. Vaya al número de la lista que coincida con el número de parpadeos del BDI y siga las instrucciones.

Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones descritas, póngase en contacto con su servicio técnico.

CÓDIGO FLASH	FALLO	EFEECTO SOBRE EL SILLA DE PODER	SOLUCIÓN
1	La carga de la batería es demasiado baja o hay una mala conexión.	La silla eléctrica sigue conduciendo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Carga las pilas. ● Compruebe todas las conexiones del cableado de la batería. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
2	Mala conexión al motor izquierdo.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe todas las conexiones entre el motor y el controlador. ● Es posible que el motor esté averiado y deba sustituirse. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
3	El cableado del motor izquierdo está defectuoso o se ha producido un calado detectado.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe todas las conexiones entre el motor y el controlador. ● Es posible que el motor esté averiado y deba sustituirse. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
4	Mala conexión al motor derecho.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe todas las conexiones entre el motor y el controlador. ● Es posible que el motor esté averiado y deba sustituirse. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
5	El cableado del motor derecho está defectuoso o se ha producido un calado detectado.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe todas las conexiones entre el motor y el controlador. ● Es posible que el motor esté averiado y deba sustituirse. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
7	Se indica un fallo del Joystick.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el Joystick está en la posición central antes de encender el mando. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
7 + 'S'	Se indica un fallo de comunicación.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Asegúrese de que el cable del Joystick está bien conectado y no está dañado. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
8	Error del controlador.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe todas las conexiones del cableado, incluidas las de la batería principal. ● Hay que cambiar el controlador. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
9	Error de freno.	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Los frenos electrónicos tienen una mala conexión o un fallo. ● Compruebe los frenos y las conexiones del motor ● Compruebe también las conexiones del controlador. ● Póngase en contacto con su servicio técnico.
10	Excesivo	La silla eléctrica deja de funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> ● La causa suele ser una mala conexión de la batería. ● Compruebe las conexiones de la batería.

10. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

10.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- a) Rango de temperatura ambiente: -25°C - 50°C / -13°F - 122°F ;
- b) Humedad relativa : $\leq 80\%$.
- c) Rango de presión atmosférica: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$;
- d) Puede transportarse en transporte general.

10.2 FUNCIONAMIENTO

- a) Rango de temperatura ambiente: -5°C - 40°C / 23°F - 104°F ;
- b) Humedad relativa : $\leq 85\%$.
- c) Rango de presión atmosférica: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$;

Información del fabricante:

Kunshan Hi-Fortune Health Products Co, Ltd
No.625 Juxiang Road zhangpu town ,
Kunshan City Jiangsu Province, China
TEL:+86 512 55195100.
FAX: +86 512 55199300
www.hi-fortune.net

Información sobre la persona responsable en el
Reino Unido/representante
Norte: SUNGO Certification Company Limited
3ª planta, 70 Gracechurch Street
EC3V 0HR
Londres, Inglaterra,
Reino Unido

Información sobre la persona responsable en la UE
SUNGO Europe B.V.
Add : fascinatío Boulevard 522,Unit 1.7,2909VA Capelle aan den IJssel,Países Bajos VAT :
NL857821659B01
Contacto : Yana Zhang(Ms.)
Título/Puesto : PRRC SRN
: NL-AR-000000247
Tel: +31(0)2021 11106
Correo electrónico:
ec.rep@sungogroup.com/yan.zhang@sungoglobal.com

Pride Oficinas corporativas y filiales:

EE.UU.

401 York Avenue

Duryea, PA 18642

www.pridemobility.com

Canadá

5096 South Service Road

Beamsville, Ontario L3J 1V4

www.pridemobility.ca

Australia

20-24 Apollo Drive

Hallam, Victoria 3803

www.pridemobility.com.au

Nueva Zelanda

391 Neilson Street

Penrose, Auckland 1061

www.pridemobility.co.nz

UK

(Representante autorizado en el Reino Unido)

32 Wedgwood Road

Bicester, Oxfordshire OX26 4UL

www.pride-mobility.co.uk

Países Bajos

De Zwaan 3

1601 MS Enkhuizen

www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.eu

Italia

Via del Lavoro Loc. Via del Lavoro

Loc. Prato della Corte

00065 Fiano Romano (RM)

www.pride-italia.it

Francia

26 Rue Monseigneur Ancel

69800 Saint-Priest

www.pridemobility.fr

España

Calle Minas Número 67

Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón

28923 Madrid

www.pridemobility.es

Alemania Josef-Förster-Straße 6-8

33161 Hövelhof

www.pridemobility.de

China

Room 508, Building #4, TianNA Business Zone

No. 500 Jianyun Road, Pudong New Area

Shanghai 201318

www.pridechina.cn